

Informieren Sie sich über eine
mögliche Kostenübernahme für
Die Mobile Badewanne „Caro“
 auf unserer Webseite
www.die-mobile-badewanne.de



Die Mobile Badewanne „Caro“

Medizinprodukt der Klasse 1



Becker GmbH
 Schumannstraße 7
 48308 Senden

Fon: 02597 93 98 52

Fax: 02597 93 98 56

info@die-mobile-badewanne.de
www.die-mobile-badewanne.de



Das mobile Ganzkörperreinigungssystem
 erspart Ihnen teure Umbaumaßnahmen

(1820 L x 750 B x 970 H [mm])



Waschtischarmatur-
schnellanschluss



Badewannen-/Duscharmatur-
schnellanschluss



Handbrause mit Brause-
schlauch und Steckanschluss



Entwässerungsschlauch

Die Mobile Badewanne „Caro“

Die Mobile Badewanne „Caro“ ist ein Hilfsmittel, das speziell für die Pflege von Personen mit Behinderung konzipiert wurde - sie ist ein mobiles Ganzkörperreinigungssystem und ein Medizinprodukt der Klasse 1.

Wir haben **Die Mobile Badewanne „Caro“** aufgrund eigener Pflegeerfahrungen entwickelt. Sie ist leicht bedienbar, überall einsetzbar und unterstützt beim täglichen Baden bzw. bei der Ganzkörperpflege in Privathaushalten, Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Pflege- und Seniorenheimen.

Die Mobile Badewanne „Caro“ ermöglicht dem Pflegepersonal ein rückenfreundliches Arbeiten und mehr Flexibilität. Ein großer Vorteil besteht darin, dass die badende Person von allen Seiten gepflegt werden kann.

Dank ihrer Mobilität kann **Die Mobile Badewanne „Caro“**, selbst bei einer kleinstmöglichen Türbreite von 78 cm, in allen Räumen optimal eingesetzt werden.

Die Mobile Badewanne „Caro“ erspart Ihnen teure Umbaumaßnahmen.

Ausführliche Informationen entnehmen
Sie bitte der Bedienungsanleitung!



1. BEDIENUNGSSCHRITT

Zuerst schließen Sie **Die Mobile Badewanne „Caro“** an die Wasserzufuhr an. Hierfür gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. **Die Mobile Badewanne „Caro“** verfügt über eine Handbrausehalterung in der Sie Ihre vorhandene Handbrause der bauseits vorhandenen Badewanne bzw. Dusche stecken können. Oder Sie nutzen unsere optionale Befüllungseinheit - bestehend aus zwei Schnellanschlüssen für Waschtisch-, Dusch- und Badewannenarmaturen, sowie einer Handbrause mit Brause-schlauch und Steckanschluss.

2. BEDIENUNGSSCHRITT

Nun befüllen Sie **Die Mobile Badewanne „Caro“** mit Wasser. Um das Badewasser einzulassen, benutzen Sie die Handbrause in der Halterung. Um Ihnen das Baden zu vereinfachen, kann mittig in der Badewanne unsere optionale Lagerungs- bzw. Sitzhilfe aus Edelstahl eingesetzt werden. Diese kann man nach verschiedenen Rückenlängen einstellen und aus der Badewanne herausnehmen.

3. BEDIENUNGSSCHRITT

Nach dem Baden lassen Sie das Badewasser einfach mit Hilfe des grauen Entwässerungsschlauchs in Ihrer vorhandenen Toilette, Badewanne oder Dusche ab.